

# BODE Eurospender 3

## Dosierspender für Händehygiene-Produkte



**Robuster, autoklavierbarer Spender für Betten zur hygienischen Entnahme von Hände-Desinfektionsmitteln; zur Fußteilbefestigung lieferbar.**



# BODE Eurospender 3

Für die Compliance in der Händedesinfektion ist es von besonderer Bedeutung, dass das Hände-Desinfektionsmittel einfach erreichbar am Ort des Geschehens verfügbar ist. Eine Möglichkeit besteht zum Beispiel in der Befestigung eines BODE Eurospender 3 am Bett des Patienten bzw. Bewohners. In Abhängigkeit von der Bettkonstruktion kann der Spender am Fußteil eingehängt werden.

## Eigenschaften

- geeignet für 500 ml-BODE Flaschen
- robuste Drahtkonstruktion
- einfache Installation und Bedienung
- autoklavierbar
- kein Befestigungsmaterial erforderlich
- Lieferung ohne Flasche und Dosierpumpe

## Material

Der BODE Eurospender 3 besteht aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl. Die gesamte Konstruktion ist elektrolytpoliert und erhält dadurch ein besonders glattes, glänzendes Finish. Neben dem optischen Effekt bietet dies auch hygienische Vorteile: Eine zusätzliche Beschichtung, die abblättern könnte, ist nicht erforderlich.

## Montage

Der Spender wird zur Montage einfach über das Fußteil gehängt. Die 500 ml-Flaschen mit aufgeschraubter Pumpe können sofort eingesetzt werden.

## Aufbereitung

Spender und Dosierpumpe sind nach Bedarf, spätestens aber beim Flaschenwechsel, zu reinigen und zu desinfizieren.

Zur manuellen Aufbereitung den Spender mit einem mit alkoholischen Flächen-Desinfektionsmittel (z. B. Bacillo® AF) getränkten Lappen oder mit desinfizierenden Einmaltüchern (z. B. St-tissues) abwischen. Dabei die Einwirkzeit des Desinfektionsmittels beachten.

Der Spender kann außerdem mit Heißdampf bei 121 °C, 1 bar, autoklaviert werden. Vorher bitte Flasche und Pumpe entnehmen!

Zur manuellen Aufbereitung der Pumpe diese mit heißem Wasser durchspülen und von Produktresten befreien. Ein alkoholisches Flächen-Desinfektionsmittel (z. B. Bacillo® AF) durchspülen und 5 Minuten einwirken lassen. Die Pumpe wieder leer pumpen und nach vollständigem Trocknen einsetzen oder staubfrei lagern.

## Technische Daten

<b>BODE Eurospender 3</b>	<b>500 ml</b> mit gerader Halterung
Höhe	135 mm
Breite	73 mm
Tiefe (ohne Halterung)	75 mm

## Lieferbare Größen

<b>BODE Eurospender 3 für 500 ml-Flaschen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Art.-Nr.</b>
mit gerader Halterung	10 St.	975105

## Dosierpumpe

<b>Dosierpumpe für 500 ml-Flaschen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	1 St.	975330

**BODE CHEMIE HAMBURG** · Germany  
Melanchthonstr. 27 · 22525 Hamburg  
Tel. (+49-40) 5 40 06-0 · Fax -200  
[www.bode-chemie.com](http://www.bode-chemie.com) · [info@bode-chemie.de](mailto:info@bode-chemie.de)

Vertrieb Österreich: **BDF ●●●●** Beiersdorf Ges.mbH  
Tel. (+43-1) 61 400-0 · Fax -394  
[medical.office@beiersdorf.com](mailto:medical.office@beiersdorf.com)

Vertrieb Schweiz: **BDF ●●●●** Beiersdorf AG  
Tel. (+41-61) 41 56-261 · Fax -331  
[Kddes@beiersdorf.com](mailto:Kddes@beiersdorf.com)

