

# BODE Eurospender 3000

## Dosierspender für Händehygiene-Produkte



**Spender für die hygienische Entnahme von Produkten zur Händehygiene, -reinigung und -pflege bei beengten Raumverhältnissen.**

# BODE Eurospender 3000



Die Händehygiene ist ein wesentlicher Eckpfeiler der Infektions- und Kontaminationsprophylaxe in Krankenhaus und Industrie. In der täglichen Praxis leisten dabei Spendersysteme einen wichtigen Beitrag. Nicht immer ist es möglich, Spendersysteme mit entsprechend langen Armhebeln für die vorschriftsmäßige Produktentnahme per Ellenbogen anzubringen. Eine platz sparende und dennoch hygienische Alternative bietet der BODE Eurospender 3000, der sich bei entsprechend stabiler Wandmontage ebenfalls mit dem Ellenbogen bedienen lässt.

## Eigenschaften

Der BODE Eurospender 3000 ist eine einfache und praktische Applikationshilfe für die hygienische Entnahme von Waschlotionen und Pflegepräparaten sowie für die Entnahme von Hände-Desinfektionsmitteln bei beengten Raumverhältnissen.

Der Spender erlaubt eine schnelle und unkomplizierte Befüllung mit 350/500 ml-BODE Flaschen.

Die Vorteile auf einen Blick:

- aus stabilem, belastbarem Kunststoff
- einfache Bedienung und Reinigung/Desinfektion
- selbst bei schwierigen Raumverhältnissen montierbar
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial und Montage-/Bedienungsanleitung und Dosierpumpe

## Aufbau und Material

Der BODE Eurospender 3000 besteht aus stabilem, belastbarem Kunststoff und bildet zusammen mit BODE Präparaten ein bedarfsgerechtes System zum Kontaminationsschutz bzw. zur Applikation von Wasch- und Pflegeprodukten.

Das System besteht aus zwei Teilen:

- Rückwand aus Kunststoff mit zwei Bohrungen
- Dosierpumpe für Flüssigprodukte

Das Material des BODE Eurospender 3000 verfügt über folgende Eigenschaften:

- gute UV- und Alkoholbeständigkeit
- auf Lebensmittelunbedenklichkeit getestet und freigegeben
- Rückwand und Dosierpumpe nicht autoklavierbar

## Einsatzgebiete

Der BODE Eurospender 3000 wird bevorzugt eingesetzt:

- wenn beengte Raumverhältnisse die Anbringung von Dosierspendern mit Armhebeln verhindern
- zur praktischen und hygienischen Applikation von Wasch- und Pflegemitteln
- in Ambulanzen und Krankentransportwagen
- im Labor
- in Arztpraxen
- im Hauswirtschaftsbereich
- in Küchen
- in hygiene relevanten Bereichen der Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie



## Wandmontage

Durch die einfache Konstruktion lässt sich der BODE Eurospender 3000 ohne großen Aufwand an der Wand fixieren.

Zur Montage werden eine Bohrmaschine und ein 6 mm-Bohrer (Typ abhängig von Wandmaterial), sowie Schraubenzieher bzw. Akku-Schrauber benötigt. Alles weitere Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben, Unterlegscheiben) ist im Lieferumfang enthalten.

Zuvor sollte der Montageort geprüft und vorbereitet werden:

- Wand sollte sauber, trocken und eben sein
- auf Tragfähigkeit achten: Zu dem Gewicht von Rückwand, Produktflasche und Pumpe kommt noch die Belastung bei der Betätigung der Pumpe hinzu
- sicherstellen, dass beim Bohren keine elektrischen Leitungen, Gasleitungen oder sonstige Installationskabel und -rohre beschädigt werden

Für die Montage werden die Bohrlöcher an der Wand markiert (ggf. Spender-Befestigungslöcher als Bohrschablone verwenden) und die Bohrungen vorgenommen.

1. Die Bohrlöcher am vorgesehenen Platz mit den beiliegenden Dübeln bestücken und die Rückwand mit den ebenfalls beiliegenden Unterlegscheiben und Schrauben befestigen.
2. Nach Anbringen der Rückwand, Flaschenverschluss der BODE-Originalflasche entfernen.
3. Flasche von unten in die Spenderhalterung einsetzen und Verzahnung einrasten.
4. Die Dosierpumpe auf die Flasche schrauben. Die Flasche sitzt fest in der Halterung und kann nicht verrutschen. Auch eine Bedienung mit dem Ellenbogen ist möglich.

Zur Inbetriebnahme, Dosierpumpe mehrfach betätigen, damit das Produkt im Steigrohr angesaugt wird. Dabei die Hand unter den Pumpenauslauf halten.

Achtung: Die BODE Eurospender 3000 können nicht mit Powerstrips befestigt werden. Zur sicheren Anbringung bitte das mitgelieferte Befestigungsmaterial verwenden.

## Aufbereitung

Die Reinigung und Desinfektion des BODE Eurospender 3000 sollte regelmäßig, mindestens aber bei Flaschenwechsel erfolgen.

### Reinigung und Desinfektion der Rückwand

- Dosierpumpe abschrauben
- Flasche herausnehmen
- Oberfläche der Rückwand mit einem alkoholischen Flächen-Desinfektionsmittel abwischen

### Aufbereitung der Dosierpumpe

Dosierpumpen für Hände-Desinfektionsmittel, Wasch- und Pflegelotionen, die mehrfach verwendet werden, sind bei jedem Flaschenwechsel zu reinigen und zu desinfizieren:

- Dosierpumpe von der leeren Flasche abnehmen
- gründlich mit feuchtem Einmaltuch abwischen
- auf eine Flasche mit heißem Wasser schrauben und durchspülen
- Pumpe wieder abschrauben und mit einem Einmaltuch abtrocknen
- Pumpe anschließend auf eine Flasche mit einem alkoholischen Flächen-Desinfektionsmittel aufsetzen und durchspülen
- 5 Minuten einwirken lassen
- Pumpe leer pumpen, abschrauben und trocknen lassen
- Schraubverschluss und Pumpenauslauf mit alkoholgetränktem Einmaltuch abwischen
- Pumpe im Halter auf neue Originalflasche schrauben und durchpumpen, bis das Produkt angesaugt wird

Hinweis: Keine Scheuermittel oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden!

## Haltbarkeit von Produkten

Mit dem Aufschrauben der Dosierpumpen auf die Flasche bzw. mit erstmaligem Öffnen des Produktes bei der Inbetriebnahme, ist das Produkt als offen anzusehen. Als Anhaltspunkt für die Haltbarkeit sind daher die Herstellerangaben für geöffnete Behälter bzw. Flaschen zu berücksichtigen. Ein Nachfüllen der Flaschen hat auch aus Gründen der Haltbarkeit zu unterbleiben, da alte Produktreste die Haltbarkeit der Originalprodukte herabsetzen.



# BODE Eurospender 3000

## Lieferbare Größen

<b>Eurospender 3000</b>	<b>Liefer-Einheit</b>	<b>No.</b>
für 350/500 ml-Flaschen	1 St.	975310

Lieferung inkl. Dosierpumpe, Befestigungsmaterial und Montage-/ Bedienungsanleitung.

## Ersatzpumpen

<b>Dosierpumpe (flüssig)</b>	<b>Liefer-Einheit</b>	<b>No.</b>
für 350/500 ml-Flaschen	1 St.	975320

**BODE Chemie GmbH** · Germany  
 Melanchthonstr. 27 · 22525 Hamburg  
 Tel. (+49-40) 5 40 06-0 · Fax -200  
[www.bode-chemie.com](http://www.bode-chemie.com) · [info@bode-chemie.de](mailto:info@bode-chemie.de)

**PAUL HARTMANN AG**  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

Ein Unternehmen der  
 HARTMANN GRUPPE

