


# BODE Eurospender 3

## Dosierspender für Händehygiene-Produkte

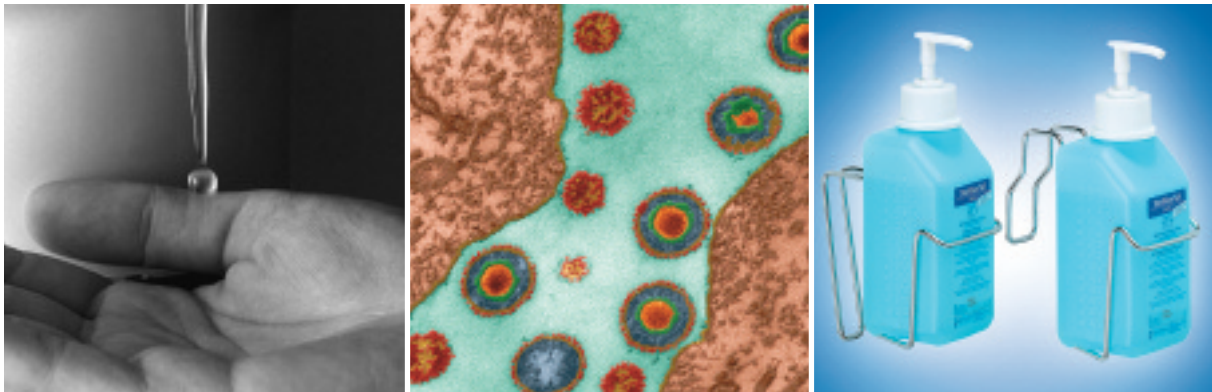

**Robuster, autoklavierbarer Spender für Betten zur hygienischen Entnahme von Hände-Desinfektionsmitteln; wahlweise für Rohrrahmen oder Fußteilbefestigung lieferbar**



# BODE Eurospender 3

Für die Compliance in der Händedesinfektion ist es von besonderer Bedeutung, dass das Hände-Desinfektionsmittel einfach erreichbar am Ort des Geschehens verfügbar ist. Eine Möglichkeit besteht zum Beispiel in der Befestigung eines BODE Eurospender 3 am Bett des Patienten bzw. Bewohners. In Abhängigkeit von der Bettkonstruktion kann das Modell mit gebogener Halterung am Rohrrahmen oder die Variante mit gerader Halterung am Fußteil eingehängt werden.

## Eigenschaften

- geeignet für 500 ml BODE Flaschen
- robuste Drahtkonstruktion
- einfache Installation und Bedienung
- autoklavierbar
- kein Befestigungsmaterial erforderlich
- Lieferung ohne Flasche und Dosierpumpe

## Material

Der BODE Eurospender 3 besteht aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl. Die gesamte Konstruktion ist elektrolytpoliert und erhält dadurch ein besonders glattes, glänzendes Finish. Neben dem optischen Effekt bietet dies auch hygienische Vorteile: Eine zusätzliche Beschichtung, die abblättern könnte, ist nicht erforderlich.

## Montage

Beide Spendervarianten werden zur Montage einfach über den Rohrrahmen bzw. das Fußteil gehängt. Die 500 ml Flaschen mit aufgeschraubter Pumpe können sofort eingesetzt werden.

## Aufbereitung

Spender und Dosierpumpe sind nach Bedarf, spätestens aber beim Flaschenwechsel, zu reinigen und zu desinfizieren.

Zur manuellen Aufbereitung den Spender mit einem mit alkoholischen Flächen-Desinfektionsmittel (z. B. mit Bacillo® AF) getränkten Lappen oder mit desinfizierenden Einmaltüchern (z. B. St-tissues) abwischen. Dabei die Einwirkzeit des Desinfektionsmittels beachten.

Der Spender kann außerdem mit Heißdampf bei 121°C, 1 bar, autoklaviert werden. Vorher bitte Flasche und Pumpe entnehmen!

Zur manuellen Aufbereitung der Pumpe diese mit heißem Wasser durchspülen und von Produktresten befreien. Ein alkoholisches Flächen-Desinfektionsmittel (z. B. Bacillo® AF) durchspülen und 5 Minuten einwirken lassen. Die Pumpe wieder leer pumpen und nach vollständigem Trocknen einsetzen oder staubfrei lagern.

## Technische Daten

| BODE Eurospender 3     | 500 ml<br>mit gerader<br>Halterung für<br>Rohrrahmen | 500 ml<br>mit gebogener<br>Halterung für<br>Fußteil |
|------------------------|--|---|
| Höhe                   | 113 mm   | 140 mm  |
| Breite                 | 73 mm  | 73 mm   |
| Tiefe (ohne Halterung) | 75 mm  | 75 mm   |

## Lieferbare Größen

| BODE Eurospender 3<br>für 500 ml-Flaschen | Einheit | Art.-Nr. |
|---|---------|----------|
| mit gerader Halterung                     | 10 St.  | 975100   |
| mit gebogener Halterung                   | 10 St.  | 975090   |

## Dosierpumpe

| Dosierpumpe         | Einheit | Art.-Nr. | Art.-Nr.<br>ab vorr.<br>07/2006 |
|---------------------|---------|----------|---------------------------------|
| für 500 ml-Flaschen | 1 St.   | 814270   | 975330                          |

**BODE CHEMIE HAMBURG** · Germany  
Melanchthonstr. 27 · 22525 Hamburg  
Tel. (+49-40) 5 40 06-0 · Fax -200  
[www.bode-chemie.com](http://www.bode-chemie.com) · [info@bode-chemie.de](mailto:info@bode-chemie.de)

Vertrieb Österreich: **BDF** ●●●● Beiersdorf Ges.mbH  
Tel. (+43-1) 61 400-0 · Fax -394  
[medical.office@beiersdorf.com](mailto:medical.office@beiersdorf.com)

Vertrieb Schweiz: **BDF** ●●●● Beiersdorf AG  
Tel. (+41-61) 41 56-261 · Fax -331  
[Kddes@beiersdorf.com](mailto:Kddes@beiersdorf.com)

