

BODE Eurospender 3

Dosierspender für Händehygiene-Produkte



Robuster, autoklavierbarer Spender für Betten zur hygienischen Entnahme von Händedesinfektionsmitteln; wahlweise für Rohrrahmen oder zur Fußteilbefestigung lieferbar.



BODE Eurospender 3

Für die Compliance in der Händedesinfektion ist es von besonderer Bedeutung, dass das Hände-Desinfektionsmittel einfach erreichbar am Ort des Geschehens verfügbar ist. Eine Möglichkeit besteht zum Beispiel in der Befestigung eines BODE Eurospender 3 am Bett des Patienten bzw. Bewohners. In Abhängigkeit von der Bettkonstruktion kann das Model mit gebogener Halterung am Rohrrahmen oder die Variante mit gerader Halterung am Fußteil eingehängt werden.

Eigenschaften

- geeignet für 500 ml oder 1000 ml-BODE Flaschen
- robuste Drahtkonstruktion
- einfache Installation und Bedienung
- autoklavierbar
- kein Befestigungsmaterial erforderlich
- Lieferung ohne Flasche und Dosierpumpe
- auch alternative Befestigungsmöglichkeiten erhältlich

Material

Die BODE Eurospender 3 bestehen aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl. Die gesamte Konstruktion ist elektrolytpoliert und erhält dadurch ein besonders glattes, glänzendes Finish. Neben dem optischen Effekt bietet dies auch hygienische Vorteile: Eine zusätzliche Beschichtung, die abblättern könnte, ist nicht erforderlich.

Montage

Die Spendervarianten werden zur Montage einfach über den Rohrrahmen bzw. das Fußteil gehängt. Die 500 ml bzw. die 1000 ml-Flaschen mit aufgeschraubter Pumpe können sofort eingesetzt werden.

Aufbereitung

Spender und Dosierpumpe sind nach Bedarf, spätestens aber beim Flaschenwechsel, zu reinigen und zu desinfizieren.

Zur manuellen Aufbereitung den Spender mit einem mit alkoholischen Flächen-Desinfektionsmittel (z. B. Bacillol® AF) getränkten Lappen oder mit desinfizierenden Einmaltüchern (z. B. Bacillol Tissues) abwischen. Dabei die Einwirkzeit des Desinfektionsmittels beachten.

Der Spender kann außerdem mit Heißdampf bei 121 °C, 1 bar, autoklaviert werden. Vorher bitte Flasche und Pumpe entnehmen!

Zur manuellen Aufbereitung der Pumpe diese mit heißem Wasser durchspülen und von Produktresten befreien. Ein alkoholisches Flächen-Desinfektionsmittel (z. B. Bacillol® AF) durchspülen und 5 Minuten einwirken lassen. Die Pumpe wieder leer pumpen und nach vollständigem Trocknen einsetzen oder staubfrei lagern.

Technische Daten

BODE Eurospender 3

500 ml (H x B x T ohne Halterung) 115 x 73 x 75 mm
(gerade Halterung)

500 ml (H x B x T ohne Halterung) 140 x 73 x 75 mm
(gebogene Halterung)

500 ml (H x B x T ohne Halterung) 135 x 73 x 75 mm
(mit enger gerader Halterung für Fußteile von ITS-Betten)

1000 ml (H x B x T ohne Halterung) 140 x 90 x 90 mm
(gebogene Halterung)

Lieferbare Größen

BODE Eurospender 3

| BODE Eurospender 3 für 500 ml-Flaschen | Einheit | Art.-Nr. |
|---|---------|----------|
| mit gerader Halterung | 10 St. | 975100 |
| mit gebogener Halterung | 10 St. | 975090 |
| für ITS-Betten | 10 St. | 975105 |
| BODE Eurospender 3 für 1000 ml-Flaschen | | |
| mit gebogener Halterung | 10 St. | 981088 |

Dosierpumpe

| Dosierpumpe | Einheit | Art.-Nr. |
|----------------------|---------|----------|
| für 500 ml-Flaschen | 1 St. | 975330 |
| für 1000 ml-Flaschen | 1 St. | 975340 |

Alternative Befestigungsmöglichkeiten

| | Einheit | Art.-Nr. |
|--|---------|----------|
| Tischklemme für 500 ml-Flaschen | 10 St. | 975106 |
| Wandplatte | 10 St. | 975107* |
| Rohrschelle | 10 St. | 975108* |

* Hierfür als Spender den Eurospender 3 mit gerader Halterung für 500 ml-Flaschen (Art.-Nr. 957100) verwenden.